

# DISCIPLINARE UTILIZZO SEDIA DA MARE PER DISABILI STAGIONE ESTIVA 2016

Si rende presente che, nell'implementazione di un turismo accessibile ai disabili, villeggianti e residenti, che d'estate frequentano le strutture balneari ed alberghiere del comune di Pineto, viene messa a disposizione una sedia da mare per diversamente abili con difficoltà motorie, che permette loro di raggiungere la riva e fare il bagno.


Per un corretto utilizzo della carrozzina si invitano gli utenti a leggere il seguente disciplinare.

**Il mancato o parziale rispetto del disciplinare causa l'impedimento all'utilizzo della sedia da mare.**

## CARATTERISTICHE



La carrozzina Sand&Sea è una sedia da mare non invasiva, progettata per compensare o attenuare un handicap motorio. Il telaio è in alluminio, alcuni particolari sono in materiale composito ed il rivestimento è in PE (polietilene). È dotata di una ruota posteriore estraibile Sand&Street, in alluminio e gomma piena da 24" che permette all'utilizzatore di spostarsi, anche autonomamente, su strada, su sabbia e in acqua. I braccioli della carrozzina sono estraibili, agevolando così la salita e la discesa dalla sedia, e la ruota anteriore da 260 mm (non piroettante) agevola gli spostamenti.

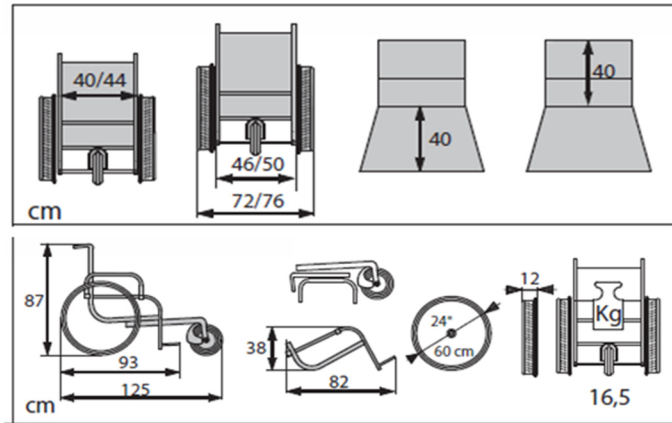

## CONSIGLI PER L'USO

- Per facilitare il trasporto, è possibile smontare la sedia da mare rimuovendo la ruotina anteriore, le ruote posteriori, i tubi dello schienale ed i braccioli;
- Dopo il bagno con la sedia da mare, si consiglia di lavare le ruote con acqua dolce poiché sono montate con i cuscinetti;
- Quando si entra in acqua è meglio procedere di traverso, cioè di 45° rispetto alle onde del mare, per non rischiare il ribaltamento;
- Se l'utilizzatore non è in grado di muoversi autonomamente sulla sabbia, per l'accompagnatore risulta più semplice tirare la sedia da mare in avanti, oppure all'indietro, piuttosto che spingerla.

## ATTENZIONE!

- La sedia da mare **NON** è dotata di freno di stazionamento.
- **Affrontare pendenze sopra i 6° sempre con un accompagnatore.**
- La sedia da mare va usata solo per il trasporto di una persona e non di oggetti.
- Tenere la sedia da mare lontana da fonti di calore in quanto i rivestimenti non sono ignifughi.

# DISCIPLINARE

- L'utilizzo della sedia da mare è gratuito.
- La richiesta della sedia da mare va effettuata tramite un messaggio scritto su WhatsApp al numero \*\*\* \*\*\*\*\*, con un preavviso di almeno 24 ore prima dell'uso.
- Le richieste vengono inoltrate all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sede di Teramo , la quale organizza le disponibilità degli utenti e comunica giornalmente la destinazione della carrozzina all'Associazione PROS Onlus Pineto, che predispone il trasporto dalla loro sede operativa al luogo nel quale il servizio viene richiesto.
- **La sedia da mare è disponibile tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria mattutina 09:30 – 12:30 e pomeridiana 15:00 – 18:00.**
- La singola utenza può effettuare **un massimo di 3 prenotazioni nell'arco della settimana e 5 prenotazioni nell'arco del mese.**
- La prenotazione della sedia da mare in entrambe le fasce orarie del medesimo giorno viene considerata come doppia prenotazione.
- Una eventuale disdetta deve essere comunicata dall'utente al responsabile del servizio obbligatoriamente entro le 24 ore precedenti la prenotazione.
- Nel caso si verificassero più di 2 disdette da parte della singola utenza nell'arco temporale di un mese, la prenotazione si considererà come effettuata e verrà scalata al numero limite di 5 prenotazioni in un mese.
- La responsabilità del corretto utilizzo della sedia da mare è affidata all'utilizzatore del servizio. L'amministrazione comunale, il coordinatore del servizio e il PROS Onlus Pineto non si assumono la responsabilità di eventuali danni causati a persone, animali o cose, derivati da un uso improprio della sedia da mare.
- La Pubblica Assistenza PROS Onlus Pineto si occupa esclusivamente del trasporto della sedia da mare dalla loro sede operativa al lido nel quale è effettuata la prenotazione, e non si occupa dell'assistenza all'utente che usufruisce del servizio.

***La pagina Facebook \*\*\*\*\* ha una funzione esclusivamente divulgativa. Per dubbi, domande o assistenza è possibile rivolgersi al numero WhatsApp \*\*\* \*\*\*\*\*.***